

# SNC 30

APPAREIL AUTOMATIQUE OU MANUEL  
DE NETTOYAGE PAR ULTRASON AVEC SÈCHEUR INTÉGRÉ  
POUR LA PRÉPARATION A LA STÉRILISATION  
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX RÉUTILISABLES



SNC 30E



*la chaîne d'asepsie  
automatisée*

Modèle ENCASTRABLE Réf.: SNC 30E  
(sur plan de travail) SNC 30E-K7


**GAMASONIC**

BP 52 - Z.A.C. de l'Angaud - 63160 BILLOM - France - Tél. 04 73 68 90 26 - Fax. 04 73 68 97 43

## TABLEAU de COMMANDE

VOYANTS de SIGNALISATION des FONCTIONS  
(Manuelles ou Automatiques)

COMMUTATEURS de COMMANDE

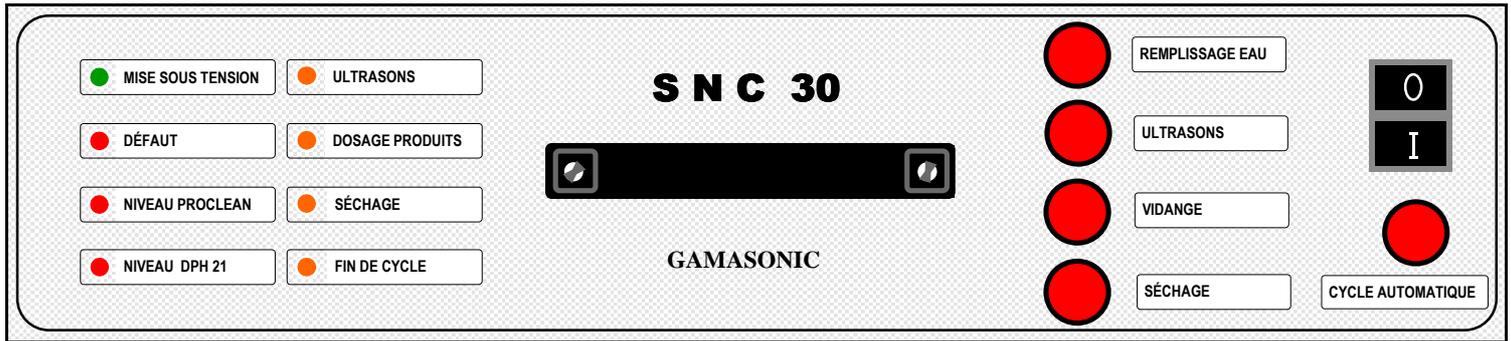

## FONCTIONNEMENT

1 - **AUTOMATIQUE** : Durée totale du cycle ~ 55mn

Chronologie du cycle :

- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons
- ▶ Nettoyage sous ultrasons avec le produit PROCLEAN
- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons et courant d'eau
- ▶ Rinçage en eau claire avec le produit DPH21 sous ultrasons
- ▶ Séchage par air chaud avec média filtrant

2 - **MANUEL** : 4 Fonctions distinctes pré-programmées

- ▶ Remplissage en eau claire (bain de trempage par exemple)
- ▶ Mise service temporisée des ultrasons
- ▶ Vidange temporisée de la cuve
- ▶ Mise en service temporisée du séchage

N.B. Ces fonctions manuelles permettent de retrouver toutes les étapes de la chaîne d'asepsie manuelle.

L'étape de prédésinfection peut être effectuée:

- soit dans un bac de trempage en amont de l'appareil, en salle de soins ou au laboratoire de stérilisation,
- soit dans la cuve de l'appareil pour un trempage statique ou aux ultrasons avec le produit DETERBAKT® dosé sous contrôle humain.

**INSTALLATION DE L'APPAREIL:** (voir documents techniques)

Le modèle SNC 30E est conçu pour être encastré dans le plan de travail d'un meuble d'une largeur de 70 cm minimum.

Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 230V. avec terre, une vidange type machine à laver et une arrivée d'eau du réseau bactériologiquement contrôlée et filtrée, raccordée sur un robinet type machine à laver(20/27).

Les bidons de produits sont raccordés et entreposés sous l'appareil dans Le niveau bas des bidons est visualisé sur le tableau de commande.

Poids de l'appareil : 35 kgs. environ



SNC 30E avec dispositifs de pompage et contrôle de niveau des produits PROCLEAN (nettoyage) et DPH 21 (rinçage final).