

Nouveau

SONOCLEANER 2017-XE

**Cuve de Nettoyage par ULTRASONS avec
Dosage Automatique du produit et Remplissage en eau.**




- SONOCLEANER 2017-XE :**
- ▶ **Manipulation réduite**
 - ▶ **Dosage maîtrisé et contrôlé**
 - ▶ **Sécurité augmentée**

GAMASONIC

BP 52 - Z.A.C. de l'Angaud - 63160 BILLOM - France
Tél. 04 73 68 90 26 - Fax 04 73 68 97 43

TABLEAU DE COMMANDE

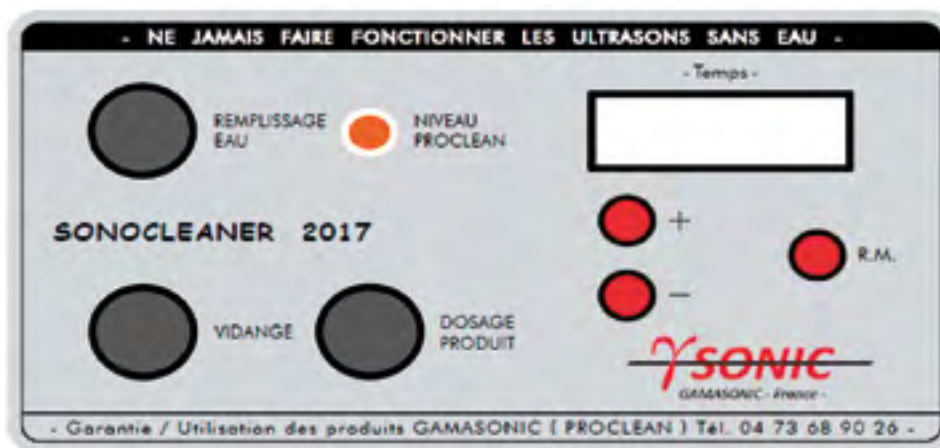

CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Cuve de nettoyage réalisée en acier inoxydable (qualité alimentaire).
- Ultrasons générés par une fréquence oscillant de 32 à 38 KHz.
- Puissance efficace : 500 Watts
- Installation : voir manuel d'implantation
- Niveau acoustique mesuré à un mètre de distance de l'appareil : 75 dB. à vide à 67 dB. en charge avec couvercle insonorisant.



2017-XE avec dispositif de remplissage du niveau d'eau dans la cuve et dispositif de pompage automatique du produit PROCLEAN

UTILISATION :

- Mettre la machine sous tension via l'interrupteur à bascule (0/I) situé à l'arrière du pupitre de commande.
 - Remplir la cuve en eau via le bouton « Remplissage eau » sur la Face Avant du pupitre de commande. Maintenir le bouton poussoir enfoncé afin de remplir la cuve jusqu'au niveau indiqué (encoche atteinte sur pièce blanche dans la cuve)
 - Effectuer le dosage du produit de nettoyage en appuyant sur le bouton « Dosage produit » par 1 impulsion (le dosage étant réglé pour 9 L d'eau dans la cuve (encoche atteinte).
- N.B. : le voyant « Niveau PROCLEAN » s'allume lorsque la fin du bidon de produit est détecté.
- Les boutons + et - permettent d'augmenter ou de diminuer le temps de fonctionnement des Ultrasons (Temps préconisé : 8-15 min. en fonction de la charge)
 - Le bouton R.M. (Rappel / Marche) : mise en fonctionnement / ou arrêt des Ultrasons.

INSTALLATION DE L'APPAREIL : (voir Manuel d'Implantation)

Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 220V. - 50Hz + prise de terre, une vidange type « machine à laver » et une arrivée d'eau du réseau bactériologiquement contrôlée et filtrée raccordée sur un robinet type machine à laver (20/27). Le bidon de produit est raccordé et entreposé sous l'appareil. Le niveau du produit Proclean est visualisé sur le pupitre de commande.

Poids de l'appareil 2017-XE : 19 Kg

- ▶ **L'appareil 2017-XE ne se substitue pas à une stérilisation des instruments après leurs nettoyage, rinçage et séchage.**
- ▶ **Ne jamais faire fonctionner les ultrasons sans eau (détérioration de la cuve)**
- ▶ **Ne jamais rien déposer directement sur le fond de la cuve → Utilisation d'un panier**

EN FIN D'UTILISATION, LAISSER L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRETÉ