

GREEN&CLEAN M2

Protocole d'utilisation



1. Appuyer deux fois sur la pompe doseuse (= 6 ml de concentré)



2. Remplir le bac mélangeur avec de l'eau froide jusqu'au tiret (= 600 ml solution à 1%)



3. Positionner la petite canule sur le petit orifice n°1 jusqu'à entendre un bruit d'air (200 ml)



4. Positionner la grosse canule sur le grand orifice n°2 jusqu'à entendre un bruit d'air (200 ml)



5. Verser la solution restante dans le crachoir (200 ml)



6. Laisser agir (HBV/HIV/HCV: 60 mn, tuberculocide: 240 mn), puis rincer

Concentré à base dual avec effet anti-mousse actif pour la désinfection et la désodorisation des systèmes d'aspiration et séparateurs d'amalgame

Particularités système dual (rouge/vert) actif contre résistance bactéricide, tuberculocide, fongicide (*C. albicans*), HBV/HIV/HCV très concentré et facile à doser
excellente désodorisation et solubilité des protéines
effet anti-mousse
testé conformément à VAH, CE-0044

Consignes d'utilisation 2 fois/jour (midi et soir) et après toute intervention chirurgicale
aspirer de l'eau froide après tout traitement
alterner les couleurs au terme des 83 utilisations (= 1 bouteille)
porter des gants de protection
respecter le dosage et temps d'action
une fois préparée, la solution est à utiliser immédiatement
respecter les indications du fabricant

DM Classe IIa. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Produit non remboursable par les organismes d'assurance maladie.

Remplissage du doseur



Soulever la partie supérieure du bac doseur et dévisser le réservoir (sens inverse des aiguilles d'une montre)



Verser la totalité de la bouteille GREEN&CLEAN M2 dans le réservoir



Revisser la partie supérieure du bac doseur (dans le sens des aiguilles d'une montre) et le replacer dans le réservoir

