



Protocole d'entretien pour votre système d'aspiration avec Orotol® plus & MD 555 cleaner



Orotol® plus – Désinfection quotidienne

Avec le concentré liquide Orotol® plus, vous disposez de la solution idéale pour la désinfection, la désodorisation, le nettoyage et l'entretien en un seul geste de tous vos systèmes d'aspiration et récupérateurs d'amalgame. À appliquer après le dernier patient à la fin de la journée, ou 2 fois par jour en cas d'activité soutenue (le midi et le soir).

Désinfection
Disinfection

1 Avant de procéder à la désinfection




Aspirer 2 litres d'eau

2 Préparer 2 litres de solution Orotol plus à 2 % (2 bouchons)



Remplir l'OroCup d'eau froide jusqu'au repère de 2 litres. Ajouter 2 bouchons doseurs Orotol plus (en respectant le repère).

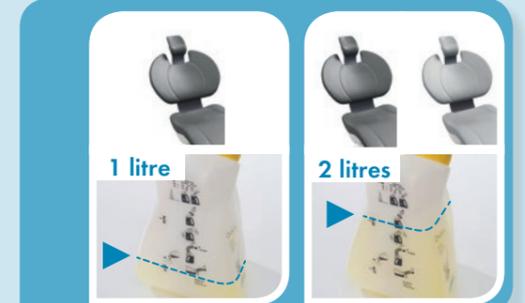

Par unité de soins :
1 litre d'eau + 1 bouchon d'Orotol® plus (20 ml)
Pour 2 unités de soins :
2 litres d'eau + 2 bouchons d'Orotol® plus (40 ml)

3 Aspiration



Fixer les tuyaux d'aspiration et aspirer 1 litre de solution par unité de soins en utilisant l'OroCup (système d'entretien muni d'adaptateurs de tuyaux pour aspirer un mélange air/solution).

4 Désinfecter le crachoir



Au moins 250 ml de solution par crachoir.

5 Temps d'action



Laisser agir pendant la nuit (minimum 1 heure). Spectre d'activité : bactéricide, tuberculocide, fongicide, partiellement virucide (VIH, VHB, VHC, norovirus).

6 Rinçage de l'unité de soins



Le matin suivant, avant la remise en service, aspirer 2 litres d'eau froide.

DÜRR DENTAL
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME

MD555 cleaner – Nettoyant spécial hebdomadaire

MD 555 cleaner est le nettoyant spécifique pour vos systèmes d'aspiration et récupérateurs d'amalgame. Très puissant, il agit contre les dépôts durs à base de tartre et de poudres abrasives, les incrustations et les obstructions. Appliquer le nettoyant 1 fois par semaine à la pause déjeuner (voire 2 fois par semaine : le mardi et le jeudi en cas d'activité soutenue).

Nettoyant
Cleaner

1 Avant de procéder au nettoyage




Aspirer 2 litres d'eau

2 Préparer 2 litres de solution MD 555 à 5 % (5 bouchons)



Remplir l'OroCup d'eau froide jusqu'au repère de 2 litres. Ajouter 5 bouchons doseurs de MD 555 cleaner (en respectant le repère).

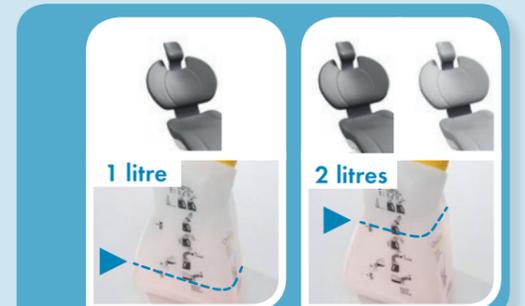

Par unité de soins :
1 litre d'eau + 2,5 bouchons de MD 555 cleaner (50 ml)
Pour 2 unités de soins :
2 litres d'eau + 5 bouchons de MD 555 cleaner (100 ml)

3 Aspiration



Fixer les tuyaux d'aspiration et aspirer 1 ou 2 litres de solution par unité de soins en utilisant l'OroCup (système d'entretien muni d'adaptateurs de tuyaux pour aspirer un mélange air/solution).

4 Nettoyage du crachoir



Au moins 250 ml de solution par crachoir

5 Temps d'action



Laisser agir pendant la pause déjeuner (30 mn minimum à 2 heures maximum).

6 Rinçage de l'unité de soins



Après la pause et avant la remise en service, aspirer 2 litres d'eau

DÜRR DENTAL
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME